

**LA AEMPS INFORMA DE UN POSIBLE DESGASTE PREMATURO EN
LAS CONTERAS DE DETERMINADAS MULETAS DE ANTEBRAZO,
BASTONES DE ALUMINIO LIGERO Y CONTERAS DE GOMA CON
INSERTO DE ACERO**

ASUNTO:

- El fabricante ha detectado un posible lote defectuoso de conteras de goma que podría provocar un desgaste prematuro durante su uso
- Este desgaste suele ser visible tras dos o tres semanas de uso
- La Agencia establece una serie de recomendaciones de actuación dirigidas a personas usuarias, distribuidores, farmacias y ortopedias

ADJUNTO:

Nota informativa: productos sanitarios, seguridad

Referencia: PS, 11/2026

12 de marzo de 2026

**CENTRO DE INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS
COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE NAVARRA**

La AEMPS informa de un posible desgaste prematuro en las conteras de determinadas muletas de antebrazo, bastones de aluminio ligero y conteras de goma con inserto de acero

Fecha de publicación: 12 de marzo de 2026

Categoría: productos sanitarios, seguridad

Referencia: PS, 11/2026

- El fabricante ha detectado un posible lote defectuoso de conteras de goma que podría provocar un desgaste prematuro durante su uso
- Este desgaste suele ser visible tras dos o tres semanas de uso
- La Agencia establece una serie de recomendaciones de actuación dirigidas a personas usuarias, distribuidores, farmacias y ortopedias

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha tenido conocimiento, a través de la autoridad competente de Alemania, de un posible desgaste prematuro en las conteras de determinados modelos de muletas y bastones, así como en conteras de goma con inserto de acero comercializadas por separado, fabricadas por la empresa alemana Ossenberg GmbH.

El desgaste prematuro podría atribuirse a un lote defectuoso, asociado a anomalías en el material de las conteras. Este desgaste, más rápido de lo habitual, puede observarse tras dos o tres semanas de uso y manifestarse mediante un desgaste significativamente mayor en la superficie de uso, la aparición de grietas o degradación del material y la reducción del perfil de la contera.

Como consecuencia de este desgaste, las personas usuarias podrían experimentar una disminución de la resistencia al deslizamiento, una reducción de la estabilidad del apoyo e incluso un riesgo potencial de caída.

Situación actual en España

Las muletas, bastones y conteras han sido distribuidos en España por KMINA Improving Mobility Development S.L., Ayudas Tecno Dinámicas, S.L. e Ibor médica. Estas empresas están enviando una [nota de aviso](#) dirigida a farmacias y ortopedias para informarles del problema detectado y de las acciones a seguir.

Productos afectados

Los productos afectados son las muletas de antebrazo KLASSIKER, KIDDY, JUNIOR y EASY, los bastones de aluminio ligero LM-Stock Kiddy y las conteras de goma con inserto de acero, comercializados entre agosto de 2024 y agosto de 2025. Las conteras afectadas pueden ser de color azul, gris o negro.

Número de artículo	Descripción
220CASKBI	Forearm crutch KLASSIKER from light metal up to 140 kg – CLIP – anatomical soft grip – KOMBI blue
220CASKBI-L	Forearm crutch KLASSIKER from light metal up to 140 kg – CLIP – anatomical soft grip – KOMBI blue – left
220CASKBI-R	Forearm crutch KLASSIKER from light metal up to 140 kg – CLIP – anatomical soft grip – KOMBI blue – right
220CASKGr	Forearm crutch KLASSIKER from light metal up to 140 kg – CLIP – anatomical soft grip – KOMBI grey
220CASKSw	Forearm crutch KLASSIKER from light metal up to 140 kg – CLIP – anatomical soft grip- KOMBI black
220CASKTUE	Forearm crutch KLASSIKER from light metal up to 140 kg – CLIP – anatomical soft grip- KOMBI turquoise
220CKBI	Forearm crutch KLASSIKER from light metal up to 140 kg – CLIP – Ergo Hard grip – KOMBI blue
220CKGr	Forearm crutch KLASSIKER from light metal up to 140 kg – CLIP – Ergo Hard grip – KOMBI grey
220CKSw	Forearm crutch KLASSIKER from light metal up to 140 kg – CLIP – Ergo Hard grip – KOMBI black
220CKTUE	Forearm crutch KLASSIKER from light metal up to 140 kg – CLIP – Ergo Hard grip – KOMBI turquoise
220CSKBI	Forearm crutch KLASSIKER from light metal up to 140 kg – CLIP – Ergo Soft grip – KOMBI blue
220CSKGr	Forearm crutch KLASSIKER from light metal up to 140 kg – CLIP – EErgo Soft grip – KOMBI grey
220CSKLi	Forearm crutch KLASSIKER from light metal up to 140 kg – CLIP – Ergo Soft grip – KOMBI purple

Número de artículo	Descripción
220CSKSw	Forearm crutch KLASSIKER from light metal up to 140 kg – CLIP – Ergo Soft grip- KOMBI black
220CSKTUE	Forearm crutch KLASSIKER from light metal up to 140 kg – CLIP – Ergo Soft grip- KOMBI turquoise
242-00-00-90-90-02	Forearm crutch KIDDY from light metal up to 100 kg – DRUCKKNOPF – EErgo Hard grip – colorful
242-00-02-90-90-02	Forearm crutch KIDDY from light metal up to 100 kg – DRUCKKNOPF – Ergo Hard grip – colorful
242-00-02-93-93-02	Forearm crutch KIDDY from light metal up to 100 kg – DRUCKKNOPF – Ergo Hard grip – MIX 2 – MIX 2
716-300Pbl	Rubber tip with steel inlay – 16 mm – blue – 300 Pack
716-300Pgr	Rubber tip with steel inlay – 16 mm – grey – 300 Pack
716-300Psw	Rubber tip with steel inlay – 16 mm – black – 300 Pack
716-30Pbl	Rubber tip with steel inlay – 16 mm – blue – 30 Pack
716-30Psw	Rubber tip with steel inlay – 16 mm – black – 30 Pack
716Psw	Rubber tip with steel inlay – 16 mm – black – 2 Pack



Información para personas usuarias

- Revise regularmente las conteras de goma.
- Si observa signos de desgaste prematuro, generalmente tras dos o tres semanas de uso, interrumpa su uso y lleve la muleta o el bastón a la farmacia u ortopedia donde lo compró para que reemplacen las conteras.



Información para distribuidores

- Informe a los puntos de venta sobre el problema detectado y las acciones a seguir. Facilíteles la [nota de aviso](#) e indíqueles que informen a sus clientes.
- Realice el reemplazo de las conteras afectadas que les soliciten.



Información para farmacias y ortopedias

- Comunique el problema y las medidas correctivas a los clientes que hayan adquirido alguno de estos productos.
- Realice el reemplazo de las conteras afectadas que les soliciten.

Datos de las empresas distribuidoras

KMINA Improving Mobility Development S.L.

Carrer de la Coma, 19
46160 Liria, Valencia
www.kmina.com

Ayudas Tecno Dinámicas, S.L.

C/Llobregat, 12 (Polígono industrial Urvasa)
08130 Santa Perpetua de Mogoda, Barcelona
935 747 474
www.ayudasdinamicas.com

Ibor médica

C/ Pertusa, 27
50197 Zaragoza
976 132 773
www.ibor.net



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.