

LA AEMPS INFORMA DE UN RIESGO RELACIONADO CON DETERMINADAS SILLAS DE RUEDAS ELÉCTRICAS QUIRUMED

ASUNTO:

- El fabricante ha identificado que las patas delanteras podrían doblarse si el producto se utiliza fuera de las condiciones especificadas en las instrucciones de uso
- El uso de las sillas en esas condiciones podría reducir su estabilidad y/o rendimiento
- La Agencia establece una serie de recomendaciones de actuación dirigidas a personas usuarias y ortopedias

ADJUNTO:

Nota informativa: productos sanitarios, seguridad

Referencia: PS, 13/2026

17 de marzo de 2026

**CENTRO DE INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS
COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE NAVARRA**

La AEMPS informa de un riesgo relacionado con determinadas sillas de ruedas eléctricas Quirumed

NOTA DE SEGURIDAD

Fecha de publicación: 16 de marzo de 2026

Categoría: productos sanitarios, seguridad

Referencia: PS, 13/2026

- El fabricante ha identificado que las patas delanteras podrían doblarse si el producto se utiliza fuera de las condiciones especificadas en las instrucciones de uso
- El uso de las sillas en esas condiciones podría reducir su estabilidad y/o rendimiento
- La Agencia establece una serie de recomendaciones de actuación dirigidas a personas usuarias y ortopedias

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha tenido conocimiento, a través del fabricante Shenzhen Yattll Industry CO., LTD, China, de que en determinadas sillas de ruedas eléctricas de la marca Quirumed las patas delanteras podrían doblarse si el producto se utiliza fuera de las condiciones especificadas en las instrucciones de uso. Esto podría ocurrir por su uso en entornos no adecuados, como pendientes pronunciadas o superficies irregulares, o cuando se excede la capacidad de carga máxima. Si el producto no se utiliza según las instrucciones de uso, existe la posibilidad de que la estabilidad y/o rendimiento de la silla de rueda eléctrica se vea reducida.

Situación actual en España

El producto ha sido distribuido en España por Quirumed S.L. La empresa está enviando una [nota de aviso](#) dirigida a las personas usuarias a las que han suministrado los productos afectados para informar del problema detectado y de las acciones a seguir.

Productos afectados

Nombre comercial	Modelo	UDI-DI	Nº de serie afectados
Quirumed-Camel Hope YE246	YE246	08435270743432	Ver anexo Números de serie afectados
Quirumed- YE245C	YE245C	08435270774009	

Nombre comercial	Modelo	UDI-DI	Nº de serie afectados
Quirumed- YE245C-MAX	YE245C-MAX	08435270774528	
Quirumed- WLLC-1115	WLLC-1115	08435270742053	



Información para personas usuarias

- Compruebe si el **número de serie** de su silla de ruedas está afectado por este problema. Si dispone de alguno de los productos afectados, lea con atención la **nota de aviso** de la empresa.
- Asegúrese de seguir las instrucciones de uso actualizadas, siguiendo las condiciones de uso en interiores y en aceras o pavimentos bien mantenidos.
- No utilice la silla de ruedas en pendientes pronunciadas ni terrenos irregulares, ni exceda la capacidad de carga máxima recomendada.
- Contacte con el distribuidor o fabricante si tiene cualquier duda o consulta.



Información para ortopedias

- Compruebe si dispone de los números de serie afectados o si ha distribuido alguno de estos modelos y **números de serie** a personas usuarias.
- Póngase en contacto con las personas usuarias a las que suministró las sillas de ruedas eléctricas afectadas y proporciónese la **nota de aviso**.

Datos de la empresa distribuidora

Quirumed S.L.

Calle Corretger 115-117-119, Parque Empresarial Táctica

46980, Paterna (Comunidad Valenciana)

Teléfono: 963 05 21 66



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal **NotificaPS**. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.